



X



**L'il Back Bracer x Wondervet**

台灣地區獨家授權許可網路販售

[www.wondervet.com.tw](http://www.wondervet.com.tw)





## 穿戴方式

防護衣一共五處有魔鬼氈設計。

首先，先將腹側的魔鬼氈撕開，一共有左右兩片。

將防護衣背面的四處魔鬼氈撕開放鬆，

由狗狗吻端將衣服套入，

將後腳分別穿過彈性束帶，

將前側兩處魔鬼氈黏貼至LOGO後方的位置，

將腹部魔鬼氈略微施力黏合，以達緊貼效果。

*\*鬆緊度以狗狗舒適不影響呼吸為主\**

最後將後腳的彈性束帶調整到適當鬆緊即可。



## 洗滌

以中性洗潔精浸泡三分鐘，使用清水將洗潔精沖掉。

不可擰轉扭乾，可能導致產品變形。

平放陰乾。



收到產品後七日內，如需退換，請保持產品包裝完整（未下水清洗），並向官網聯繫。